



Enkelhet

Det skall vara enkelt och pålitligt att göra ett alkoholtest med tillförlitligt resultat. Med våra alkotester är det enkelt och pålitligt - blås upp ballongen, aktivera teströret, sätt i teströret i ballongen och pressa sakta ur luften, läs av resultatet.

Tillförlitlighet

Man måste kunna lita på sitt alkotest. Våra alkotester har en tillförlitlighet på ca 95 procent. Detta gör våra alkotester UNIKA.

Testerna är certifierade.

Tillgänglighet

Vitsen med engångs alkotest är att du alltid kan ha med dig ett test. I fickan, väskan, bilen eller hemmet. Blås och få resultatet.

Certifikat

NF EN ISO 9001, TÜV Rheinland, Afnor Certification samt Applus nr: PR-0015/012

Professionella användare

Trafikpolisen i Holland, Frankrike och Italien


Testet är kalibrerat 0,2 promille.

I testet finns gelékristaller som reagerar om du har alkohol i utandningsluften. Denna kemiska reaktion är mycket tillförlitlig. NF certifieringen garanterar att testet har minst 95 % tillförlitlighet. Testet är giltigt 1 år från tillverkningsdag.



Alco-test 95% tillförlitlighet

Våra alkoholtester är mycket enkla att använda.

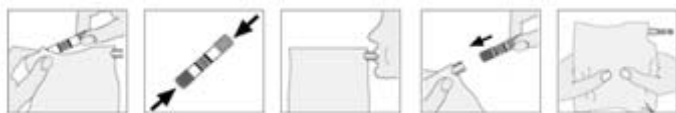

1. Ta ur testet ur förpackningen
2. Ta ur teströret från ballongens övre ficka
3. Pressa ihop teströrets båda ändar mot varandra
4. Blås upp ballongen maximalt
5. Vänta ca 12 sek
6. Sätt i teströret i ballongens rör i övre högra hörnet
7. Pressa sakta ut luften som passerar teströret

Kristallerna i röret färgas om alkohol finns i utandningsluften. Ändrar kristallerna färg och går över gränsen på linjen betyder det att du har för mycket alkohol i kroppen dvs **KÖR EJ**.

