

ergoplati®

~ den smarta rygg- och nackkudden ~



Packa upp

1

Öppna blixtlåset
hela vägen runt



2

Öppna ventilen och
kudden expanderar



3

Reglera hårdhets-
graden genom att
anpassa mängden
luft i kudden

Packa ihop



1

Öppna ventilen och
tryck ihop kudden
mot ett fast underlag



2

Stäng ventilen



3

Drag ihop
blixtlåset

Användningsområden

Ergoplati korrigerar din kroppshållning. Kuddens unika konstruktion gör att den passar olika kroppstyper.



Flat sida mot kroppen

Passar dig med liten svank som vill ha ett mjukt stöd vid exempelvis bilkörning.



Rundad sida mot kroppen

Passar dig med större svank som vill ha ett fast stöd eller för dig som är lite tyngre.



Rundad sida mot nacken

Ger maximalt stöd och avlastning åt nacken både i sittande och liggande position.

Andra vanliga användningsområden är som nackkudde i sängen, på stranden, i bilen, på flyget eller som stöd under knän och hälar. Placera din Ergoplati där det känns bäst för dig. Anpassa kuddens hårdhet efter dina behov.

Smart & flexibel

Flexibel

vändbar med en flat och en rundad sida

Praktisk

fungerar som stöd för både nacke och ländrygg

Portabel

tar liten plats i bagage och handväska

Smart

du justerar hårdheten med en smart ventil

Dunfri

tillverkad av syntetmaterial och helt fri från dun

Lätt

väger inte mer än ett äpple



Skötselråd

- ◆ *Blås aldrig upp din Ergoplati. Det kan försämra kuddens framtida prestanda.*
- ◆ *Förvara inte kudden i temperaturer över 80°C, eller under -20°C. Det kan påverka både hållbarhet och form.*
- ◆ *Torka vid behov av kuddens tyg med fuktig trasa. Kudden bör dock inte tvättas i maskin.*



Den smarta transportpåsen är utrustad med en hylsa som gör att påsen lätt kan hakas på andra väskor eller remmar. Kuddens unika ventilösning gör att den enkelt kan packas ihop och förvaras i sitt eget fodral.

Konstruktion

Ergoplati är utformad av en legitimerad naprapat. Namnet är en sammansättning av **ergonomi**, vetenskapen om metoder för människans arbete, och **plati** som betyder rygg på grekiska. Kudden är konstruerad för att ge maximal komfort och samtidigt vara lätt att ta med.

Ergoplati har en flat och en rundad sida för att passa alla kroppstyper och olika användningsområden. Formen gör att den fungerar både som stöd för nacke och ländrygg. Med den smarta ventilen justerar du kuddens hårdhet.



Ergoplati är liten och ryms i så väl handskfacket som i handväskan. Och den väger inte mer än ett äpple!

ergoplati®

~ den smarta rygg- och nackkudden ~

Resekudden är avsedd att användas där kroppen bäst behöver avlastning eller stöd. Exempelvis som ryggstöd i svanken eller bakom nacken. Ergoplati är framtagen av en legitimerad naprapat.

Ergoplati AB

Västmannagatan 44 A
SE-113 25 STOCKHOLM

www.ergoplati.se
info@ergoplati.se

