


nilloc ryggskrubbaren

Skrubbenhet monterad i duschen

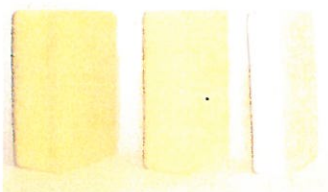

Skrubbsvamp

Softsvamp

Smörjsvamp

Uppsättning och bruksanvisning

Välj lämplig placering för ryggskrubbaren på kakel alternativt på slät glasyta i duschkabinen. För personer med längd mellan 160-190 cm skall enheten monteras 85 cm från golvet och minst 50 cm från ett hörn. Innan hållaren monteras märk nederkantens placering på väggen, rengör ytan på monteringsplatsen med rödsprit, avlägsna skyddsfilm från monteringsstejpen och tryck fast hållaren vertikalt på väggen. OBS! tejpen sitter mycket hårt på alla släta underlag och en justering är därför inte möjlig. Skulle underlaget vara ojämnt, fästes hållaren med skruv. OBS! Du måste ha fastighetsägarens tillstånd att borra i våtutrymmen.

Ryggskrubbaren är nu klar att brukas. Svamphållarens höjd kan justeras 75 cm. Justera ställskruvarna så att hållaren lätt kan flyttas i höjddled efter behag.

(Hållaren justeras uppåt och nedåt med handen och då skall den glida lätt)

Det finns tre typer av svampar, en skrubbsvamp en smörjsvamp och en softsvamp. Välj skrubbsvampen eller softsvampen om du önskar en behaglig ryggskrubbning och smörjsvampen om du vill smörja in ryggen med hudkräm eller liknande.

Svamparna är lätt löstagbara från kardborrefästet så att den kan användas till övriga kroppen.

Förpackningen innehåller:

Halkskyddsremсор för montering på golvet

Väggstativ med svamphållare

Skrubbsvamp med grov yta

Softsvamp med slät yta

Smörjsvamp